

Attends®

Spolehlivá ochrana při inkontinenci




PULL-ONS & DISCREET




Attends Pull-Ons a Pull-Ons Discreet jsou měkké a diskrétní natahovací plenkové kalhotky připomínající spodní prádlo. Lze je snadno natáhnout a stáhnout a jsou určeny pro řešení lehké, střední i těžké inkontinence.


Návod k použití

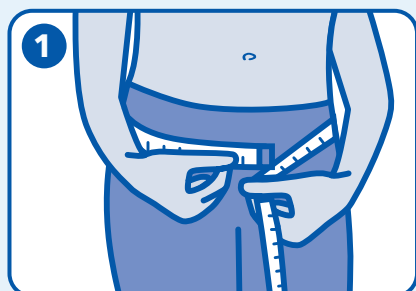


Pro zvolení správné velikosti změřte boky a pas a vyberte větší z těchto rozměrů, abyste našli svou velikost.

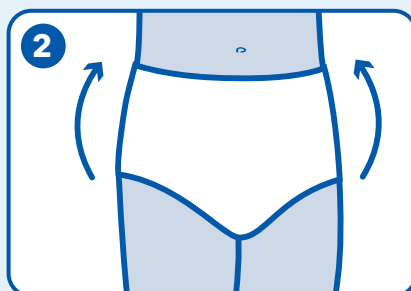


Jednoduše natáhněte a stáhněte kalhotky jako normální spodní prádlo. Díky designu lze toto provést několikrát.

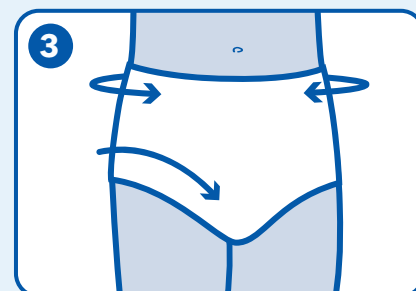

Pružný materiál kalhotek zajišťuje pohodlné a bezpečné uchycení.

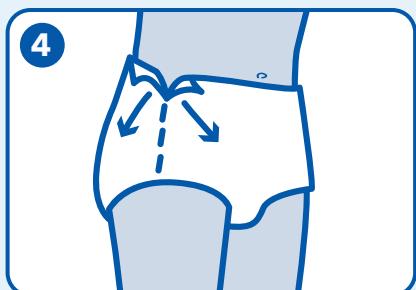

Pokud potřebujete kalhotky vyměnit, jednoduše je stáhněte nebo roztrhněte boční šev.

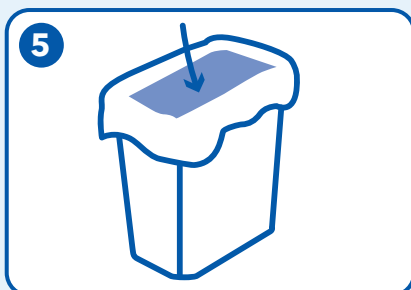

Použité kalhotky srolujte a zlikvidujte jako běžný odpad.

Pro více informací navštivte www.attends.cz

PULL-ONS & DISCREET

Tipy a triky

Výběr

- Vybírejte velikost kalhotek podle obvodu boků/pasu - dle většího rozměru.
- Zvolte úroveň absorpce na základě vydaného objemu moči. Zvolte nejdříve kalhotky s nižším číslem absorpce, v případě potřeby pak přejděte na vyšší savost.
- Pull-Ons nabízí efektivní řešení pro ty uživatele, kterým nevyhovují tvarované vložky.

Uchycení

- Barevné elastické proužky v horní části pasu označují zadní stranu produktů Pull-Ons Discreet. Zadní strana Lady Discreet a Men Discreet je rozpoznatelná díky většímu pokrytí materiálem než na přední straně.

Výměna

- Zkontrolujte indikátor vlhkosti - pokud indikátor zmizel přes polovinu délky pomůcky (60%) nebo pokud pomůcka obsahuje stolici, je potřeba kalhotky vyměnit. Pokud ne, mohou být kalhotky i nadále použity.

Likvidace

- Srolujte pomůcku a zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Kalhotky nesplachujte do toalety.