

# Attends®


Spolehlivá ochrana při inkontinenci

## Pull-Ons Pull-Ons Discreet Underwear Lady Discreet Underwear Men Protective Underwear


Attends Pull-Ons a Pull-Ons Discreet jsou měkké a diskrétní natahovací plenkové kalhotky připomínající spodní prádlo. Lze je snadno natáhnout a stáhnout a jsou určeny pro řešení lehké, střední i těžké inkontinence.




### Návod k použití

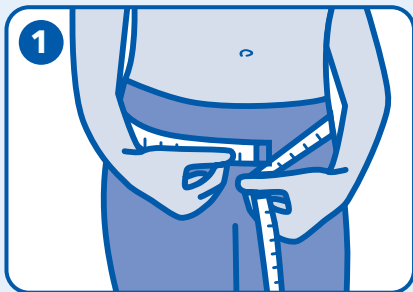


1 Pro zvolení správné velikosti změřte boky a pas a vyberte větší z těchto rozměrů, abyste našli svou velikost.

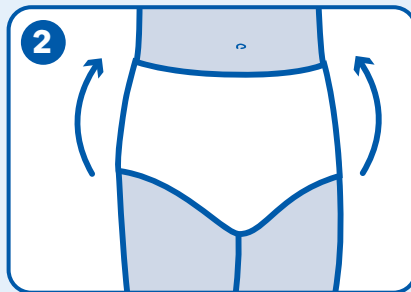


2 Jednoduše natáhněte a stáhněte kalhotky jako normální spodní prádlo. Díky designu lze toto provést několikrát.

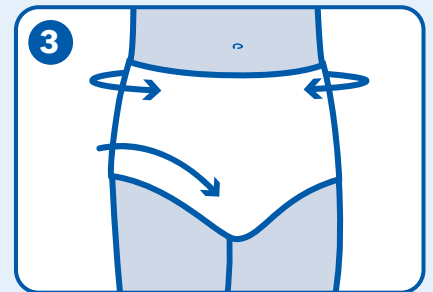

3 Pružný materiál kalhotek zajišťuje pohodlné a bezpečné uchycení.

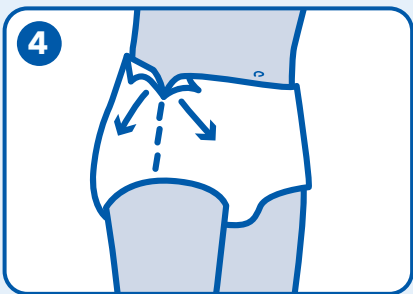

4 Pokud potřebujete kalhotky vyměnit, jednoduše je stáhněte nebo roztrhněte boční šev.

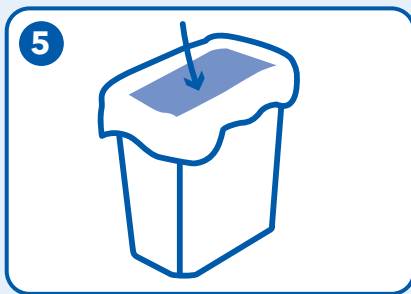

5 Použité kalhotky srolujte a zlikvidujte jako běžný odpad.

Pro více informací navštivte [www.attends.cz](http://www.attends.cz)



## Pull-Ons Pull-Ons Discreet Underwear Lady Discreet Underwear Men Protective Underwear

### Tipy a triky

#### Výběr

- Vybírejte velikost kalhotek podle obvodu boků/pasu - dle většího rozměru.
- Zvolte úroveň absorpce na základě vydaného objemu moči. Zvolte nejdříve kalhotky s nižším číslem absorpce, v případě potřeby pak přejděte na vyšší savost.
- Pull-Ons nabízí efektivní řešení pro ty uživatele, kterým nevyhovují tvarované vložky.

#### Uchycení

- Barevné elastické proužky v horní části pasu označují zadní stranu produktů Pull-Ons Discreet. Zadní strana Lady Discreet a Men Discreet je rozpoznatelná díky většímu pokrytí materiálem než na přední straně.

#### Výměna

- Zkontrolujte indikátor vlhkosti - pokud indikátor zmizel přes polovinu délky pomůcky (60%) nebo pokud pomůcka obsahuje stolici, je potřeba kalhotky vyměnit. Pokud ne, mohou být kalhotky i nadále použity.

#### Likvidace

- Srolujte pomůcku a zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Kalhotky nesplachujte do toalety.